

## Kit tampon relais absorbant avec gants



### Description produit

- Le «Kit tampon relais absorbant avec gants» est un dispositif Médical de la classe I (Directive 93/42 CEE).
- Il est conforme à l'obligation de marquage CE.
- La conception et la fabrication sont sous assurance qualité totale.
- Indications : Il est destiné au pansement des plaies hémorragiques (grandes coupures).

### Composition produit

Le kit tampon relais absorbant est constitué de :

- Une compresse à forte absorption cousue sur une bande extensible de 2 mètres sans latex.
- Une paire de gants anallergiques, à usage unique, pour la sécurité du sauveteur.

### Dimensions produit

- Il existe trois dimensions pour ce produit : - 10 cm x 10 cm,  
- 10 cm x 15 cm,  
- 20 cm x 20 cm.

### Précautions d'usage

- Vérifier que le dispositif soit opérationnel avant son utilisation : date de péremption, intégrité de l'emballage.

### Toxicité du produit

- Les matières utilisées dans les tampons relais absorbants ont été spécialement choisies pour leur caractère hypoallergénique. Se référer aux procédures en vigueur pour l'élimination des déchets de soins.

### Conditions de stockage et validité du produit

- Conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- N'ouvrir l'enveloppe protectrice externe qu'au moment de l'utilisation afin de préserver la propreté du produit.
- 5 ans dans les conditions de stockage ci-dessous. A usage unique.

### Conseils d'utilisation du produit

- Mettre la paire de gants à usage unique.
- Si le blessé est inconscient, le mettre en position latérale de sécurité.
- Avant d'appliquer le tampon relais, vérifier l'absence de corps étranger dans la plaie.
- Appliquer fermement le tampon absorbant sur la plaie.
- Maintenir la pression pendant le déroulement de la bande de fixation extensible.
- Avant de fixer l'extrémité de la bande sur elle-même, contrôler la tension de cette dernière pour éviter l'effet garrot (vérifier en relâchant la bande que l'extrémité du membre ne bleuit pas).



### Significations des pictogrammes sur l'étiquetage



Ne pas réutiliser



Utiliser jusqu'au

REF

Référence du catalogue

LOT

Code du lot