

## Sérum physiologique en dosettes de 5 ml, réf. 9977A



- ✓ Présenté en unidose
- ✓ Hygiénique
- ✓ Simple d'utilisation
- ✓ Système d'ouverture facile et rapide



### Description

- Sérum physiologique stérile, sans conservateur, non injectable.
- Indiqué pour le lavage des plaies et blessures, l'hygiène nasale pour les nez secs ou encombrés, l'hygiène oculaire, le rinçage auriculaire.
- Il convient aux nourrissons, aux enfants et aux adultes.
- Son système d'ouverture est facile et rapide, il suffit de tourner la partie supérieure.



### Caractéristiques techniques

- **Composition** : - Chlorure de sodium (NaCl) : 0,9 g ;  
- Eau purifiée : q.s.p. 100 mL ;  
- Solution stérile isotonique.
- **Indications** : - Pour l'hygiène nasale : en instillation ou en lavage pour les nez secs ou encombrés ;  
- Pour l'hygiène oculaire : en instillation, en lavage ou en bain ;  
- Pour le rinçage auriculaire ;  
- Pour le lavage des plaies ;  
- Pour inhalation en aérosolthérapie.
- **Dispositif** : stérile à usage unique et individuel.
- **Conditionnement** : 1 boîte de 100 dosettes de 5 ml.



### Conditions d'utilisation

- **Pour l'hygiène nasale et oculaire** : le sérum physiologique peut être utilisé quotidiennement, à raison d'un à six lavage(s) par jour, en fonction des besoins.
- **Pour l'hygiène du nez** (en instillation ou en lavage pour les nez secs ou encombrée) :
  - Incliner la tête en arrière ;
  - Introduire délicatement l'embout dans la narine ;
  - Appuyer légèrement sur l'unidose. Répéter l'opération pour l'autre narine ;
  - Redresser la tête pour laisser s'écouler les mucosités, puis essuyer l'excédent.
- **Pour l'hygiène des yeux** (en instillation, en lavage ou en bain) :
  - Déposer quelques gouttes de solution dans chaque oeil, en prenant garde de ne pas mettre en contact l'unidose avec la surface de l'oeil ;
  - Essuyer l'excédent de liquide avec une compresse.
- **Pour l'hygiène des oreilles** : en rinçage, pour une parfaite hygiène auriculaire, utiliser le produit pour entraîner les dépôts solubilisés de cérumen et rincer le conduit auditif externe après utilisation d'une solution tensio-active auriculaire.
  - Rincer le conduit auditif externe avec le sérum physiologique Gilbert Healthcare ;
  - Utiliser 1 dose de sérum physiologique Gilbert Healthcare pour les 2 oreilles ;
  - Essuyer l'excédent de liquide avec une compresse.
- **Pour le lavage des plaies** : rincer la plaie en utilisant la dose complète et en prenant garde de ne pas mettre en contact l'unidose avec la plaie.

• **Pour inhalation en aérosolthérapie :**

- Si le produit est utilisé comme solvant pour inhalation en aérosolthérapie, il faut se reporter aux instructions indiquées sur le produit à inhaler.
- Si le produit est utilisé seul, il faut se reporter aux instructions indiquées sur l'appareil d'aérosolthérapie.



**Précautions d'emploi**

- **Conditions de stockage :** - Tenir hors de la portée et de la vue des enfants ;
  - Ne pas utiliser une unidose endommagée ou déjà ouverte au vu du risque de rapide contamination bactérienne ;
  - Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'étui.
- **Pour l'hygiène du nez :** - Ne pas se moucher violemment au cours des 10 minutes suivant l'administration ;
  - Chez le nourrisson, instiller le produit avec le minimum de pression afin d'éviter tout risque de contamination de l'oreille moyenne.
- **Pour l'hygiène des yeux :** en cas de traitement par un collyre, attendre 15 minutes avant son instillation.
- **Pour le lavage des plaies :** essuyer l'excédent de liquide uniquement sur la peau saine.
- **Pour inhalation en aérosolthérapie :** demander conseil à son médecin en cas de première utilisation ou en cas d'hypersensibilité respiratoire, de pathologies graves respiratoires ou cardiovasculaires.