

Anti-adhésif en flacon, réf. 101YKA



Description

- Le dispositif « Anti-adhésif, en flacon », facilite le décolllement des pansements adhésifs et permet d'éliminer les traces de masse adhésive.

Caractéristiques techniques

- **Composition** : PPG 2 METHYL ETHER, C11-13 ISOPARAFFIN.
- **Classification du produit** : dispositif Médical de Classe I en Europe.
- **Conditionnement** : en flacon de 125 mL.
- **Conditions de conservation** : - Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage ;
- Conserver à température ambiante (25°C), à l'abri de la lumière et de la chaleur ;
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- **Péremption** : 36 mois à partir de la date de fabrication.
- **Date de mise sur le marché** : 1994.
- **Résponsable de mise sur le marché** : Laboratoires Gilbert, 928 Avenue du Général de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-Clair – France.

Précautions d'emploi

- Ne pas appliquer sur les plaies, les peaux lésées, les muqueuses, ni près des yeux.
- A utiliser avec précaution chez la personne âgée.
- Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 36 mois.
- Pour une utilisation avant une pose d'électrodes ou plaques de bistouri électrique, s'assurer impérativement de l'évaporation et de l'élimination de toute trace de produit à l'aide d'une compresse sèche.
- Ne pas appliquer d'autres produits sans avoir bien nettoyé la peau.
- Ne pas avaler – Usage externe.
- Le non-respect du mode d'utilisation et des précautions d'emploi peut entraîner des effets indésirables de type brûlure.

Mode d'emploi

- Détacher la languette d'inviolabilité située au niveau de la capsule lors de la première utilisation.
- Utiliser une faible quantité.
- A l'aide d'un coton imbibé, appliquer entre la peau et le pansement sans toucher la plaie, en tirant doucement sur le sparadrap.
- Essuyer systématiquement et soigneusement toute trace du produit après utilisation et notamment au niveau des zones de plis, dos, aisselles.
- Veiller à ce que le produit n'ait pas coulé. Si tel est le cas, essayer soigneusement.