

Pince à clamer stérile à usage unique, réf. 102BTA



Description

- La pince à clamer permet de stopper l'écoulement de sang ou d'une solution en pinçant une tubulure.
- Elle permet notamment de clamer les lignes de dialyse lors du branchement ou du débranchement.
- Pour utiliser convenablement la pince à clamer stérile :
 - Dans un premiers temps, il faut impérativement se laver les mains à l'aide de savon ;
 - Ensuite, le port de gants de protection est obligatoire ;
 - Enfin ouvrir délicatement le sachet pelable pour sortir la pince et la saisir entre le pouce et l'index tel que des ciseaux.
- Il convient de vérifier la composition du produit pour s'assurer que le patient n'est pas allergique à l'une des matières entrant dans sa composition.

Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : - Composition : polypropylène renforcé à la fibre de verre (bonne qualité de l'instrument médical) ;
 - Présence de latex : absence de latex ;
 - Présence de DBP/BBP/DIPP/DEHP : non.
- **Dimensions** : longueur de 12 cm.
- **Coloris** : verte.
- **Type de dispositif** : dispositif médical stérile à usage unique Classe Is.
- **Mode de stérilisation** : stérilisée à l'oxyde d'éthylène.
- **Conditionnement** : unitaire livrée sous blister.
- **Conditions de stockage** : conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière solaire, à l'abri de sources de chaleur. Conserver dans son emballage d'origine pour garder sa stérilité intacte.
- **Durée de vie de la stérilisation** : 5 ans.
- **Durée de validité** : se référer à l'étiquetage du produit.
- **Conformité** : normes applicables Directive 93/42/CEE et norme ISO 13485.