

Set de pansement avec champ et compresses, réf. 101YBA



Description

- Le set de pansements avec champ et compresses est destiné à la réfection de pansement avec précision.
- Il s'agit d'un set de soins à usage unique livré dans son emballage stérile.
- Il convient pour le milieu hospitalier ou libéral, les services d'urgence et post-opératoires.

Caractéristiques techniques

- **Composition :** - 1 blister 4 alvéoles ;
 - 1 champ opératoire bleu permettant de délimiter la zone stérile et de protéger le patient et le mobilier médical ;
 - 1 Pince anatomique double denture plastique verte ;
 - 1 Pince Kocher plastique bleue ;
 - 5 compresses non tissées 4 plis - 30 g pour une absorption optimale.
- **Matériaux :** - Camps opératoire : 1 face en cellulose et 1 face polyéthylène ;
 - DBP/BBP/DIPP/DEHP : absence ;
 - absence de latex.
- **Dimensions :** - Pincettes anatomiques double denture : longueur de 12.5 cm ;
 - Pince Kocher : longueur de 14.5 cm ;
 - Compresses non tissées : 7.5 x 7.5 cm ;
 - Champ opératoire : Lo 45 x la 38 cm ;
 - Blister 4 alvéoles : Lo 19.5 x la 15.5 cm.
- **Type de dispositif :** dispositif médical stérile à usage unique de Classe I.
- **Mode de stérilisation :** stérilisation par oxyde d'éthylène.
- **Conditionnement :** unitaire.
- **Conditions de conservation :** conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière solaire, à l'abri de sources de chaleur.
- **Durée de la validité du produit :** se référer à l'étiquetage du produit.
- **Conformité :** - Directive de l'UE 93/42/CE pour les dispositifs médicaux applicable selon Annexe n°V article 3 ;
 - EN ISO 13485.
- **Date de première mise sur le marché dans l'UE :** 15/11/2007.

Mode d'emploi

- **Performance :** - L'opérateur peut placer dans les compartiments du blister la solution de savon antiseptique, la solution de rinçage et l'antiseptique ;
 - Il place le champ à proximité de la zone de soin pour délimiter la zone stérile ;
 - Il utilise la pince anatomique et 3 compresses pour effectuer la déterision, le rinçage et le séchage de la plaie ;
 - Avec la pince Kocher et les 2 autres compresses, il effectue l'antiseptie.
- **Contre-indications :** il convient de vérifier la composition du produit pour s'assurer que le patient n'est pas allergique à l'une des matières entrant dans sa composition.